


KOD KATALOGOWY	PCO-T-02
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-02
CODE	PCO-T-02
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-02




- 1. PL:** Odepnij rzepy (1,2,3) od tylnej części kamizelki.
EN: Unfasten the Velcro (1,2,3) on the back of the vest.

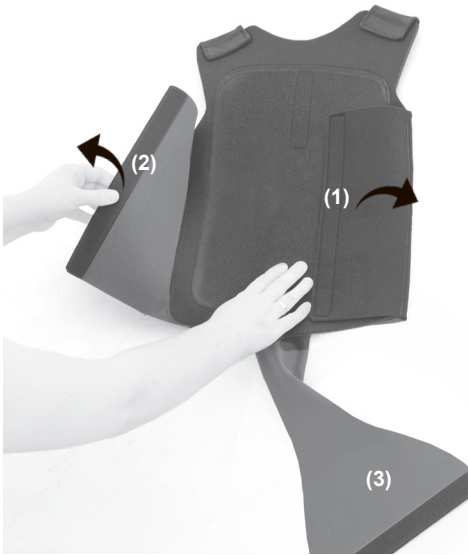


- 2. PL:** Załóż ortezę na ramiona.
EN: Put the brace on your arms.

PL: STOPNIE STABILIZACJI
EN: STABILIZATION STEPS

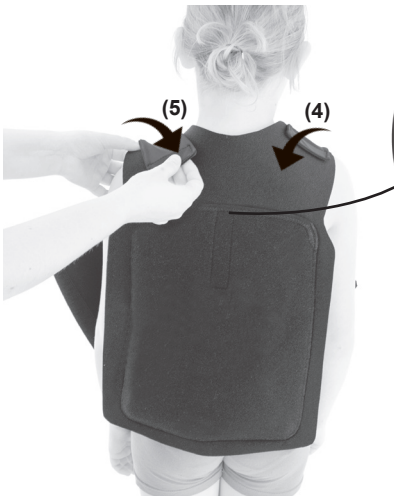


PL: Lżejsza stabilizacja
EN: Lighter stabilization

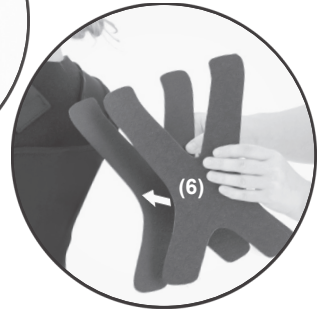


PL: Mocniejsza stabilizacja
EN: Stronger stabilization

- 3. PL:** Dopasuj górną część ortezy do sylwetki za pomocą rzepów (4,5) w okolicy barków i włóż panel stabilizujący w kieszeń elementu tylnego.
EN: Set the upper part of the brace to the body with Velcro (4,5) on the shoulders and insert the X-panel in the rear element pocket.

- 4. PL:** Jeżeli jest taka potrzeba to użyj dwóch paneli usztywniających / stabilizujących (6) dopasowując je do sylwetki.
EN: If necessary, use two stiffening / stabilizing panels (6) to adjust them to your body shape.

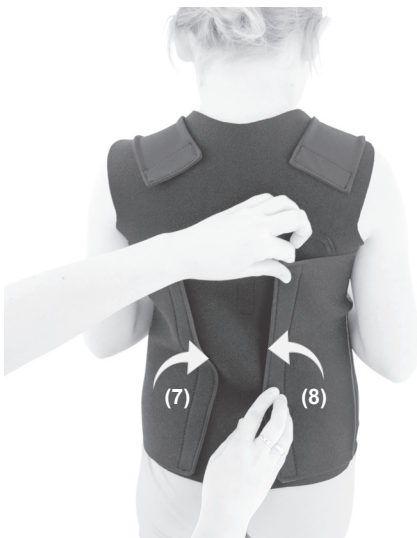

- 5. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję kamizelki zapinając tył ortezy na rzepy (7,8).
EN: Set the proper compression of the vest by fastening the back of the brace with Velcro (7,8).

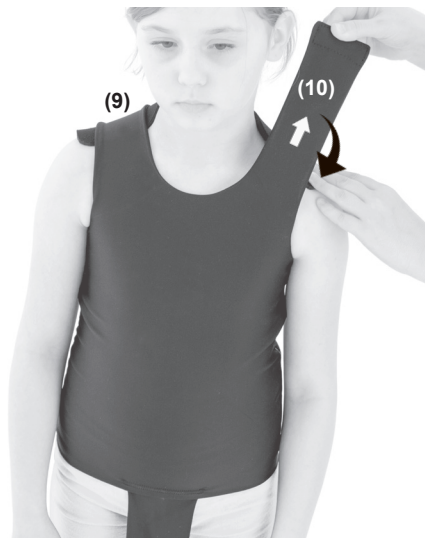

- 6. PL:** Ustaw odpowiednią kompresję górnej części kamizelki za pomocą rzepów (9,10).
EN: Set proper compression of the top of the vest with Velcro (9,10).



7. **PL:** Zapnij element stabilizujący w kroczu na rzep (11).
EN: Fasten the crotch stabilizing part with Velcro (11).



8. **PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.