



KOD KATALOGOWY	PCO-T-12
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-12
CODE	PCO-T-12
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-12

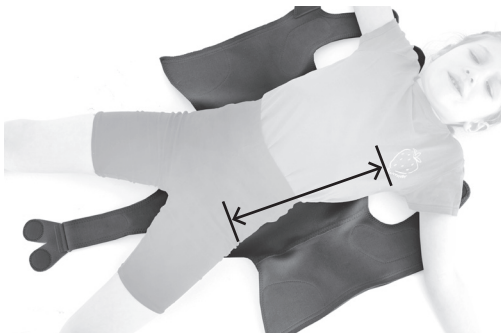


- 1. PL:** Rozepnij ortezę. Połóż pacjenta na kamizelce w taki sposób, aby jej boczna część znajdowała się na odpowiedniej wysokości.
EN: Unfasten the brace. Place the patient on the vest so that its side part is at the appropriate height.


- 2. PL:** Zapnij zamek (1).
EN: Fasten the zipper (1).

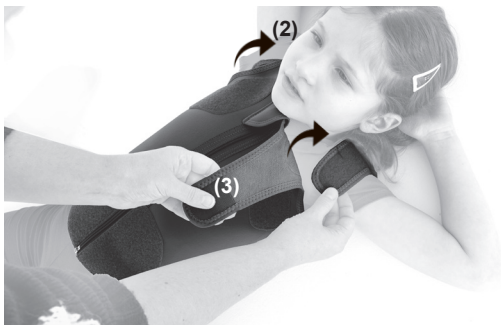

- 3. PL:** Zapnij elementy ramion na rzepy (2,3) ustawiając ich odpowiednie napięcie.
EN: Fasten the arm elements with Velcro (2,3) and set their appropriate tension.

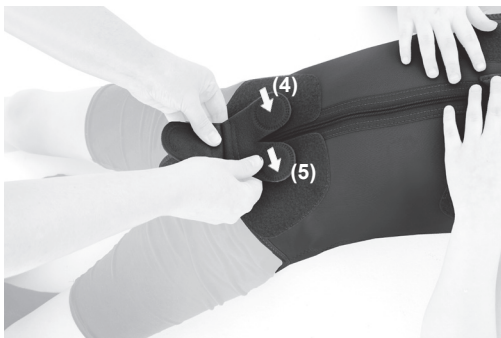

- 5. PL:** Przypnij element krocza na rzepy (4,5) do przedniej części kamizelki w odpowiednim miejscu. Ustaw odpowiednie napięcie i zapnij rzep (6).
EN: Attach the crotch piece with Velcro (4,5) to the front of the vest in the appropriate place. Set the appropriate tension and close the Velcro (6).

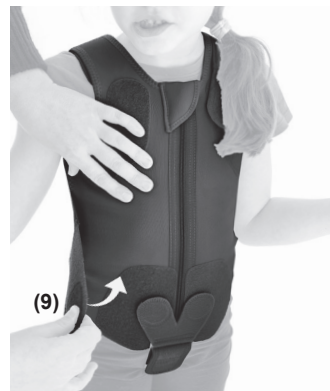

5. PL: Przypnij taśmę elastyczną (7) do rzepa znajdującego się w przedniej części kamizelki. Opleć we wskazanym kierunku (8), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij z przodu na rzep (9).

EN: Attach the elastic band (7) to the Velcro located on the front of the vest. Braid in the indicated direction (8), set the appropriate tension and fasten with Velcro at the front (9).



6. PL: Powtórz czynność z drugą taśmą.

EN: Repeat with the second tape.



7. PL: Przypnij taśmę elastyczną (13) do rzepa znajdującego się w przedniej części kamizelki. Opleć we wskazanym kierunku (14), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij z przodu na rzep (15).

EN: Attach the elastic band (13) to the Velcro located on the front of the vest. Braid in the indicated direction (14), set the appropriate tension and fasten with Velcro at the front (15).



- 8. PL:** Powtórz czynność z drugą taśmą.
EN: Repeat with the second tape.



- 9. PL:** Gotowy wyrób.
EN: Product is ready to use.