


KOD KATALOGOWY	PCO-T-15
NAZWA HANDLOWA	KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL	PCO-T-15
CODE	PCO-T-15
TRADE NAME	POSTURAL COMPRESSION ORTHOSES
MODEL	PCO-T-15




- 1. PL:** Rozepnij ortezę i wsuń ją przez nogi na tułów.
EN: Unfasten the brace and slide it through your legs onto your torso.



- 2. PL:** Zapnij rzepy.
EN: Fasten the Velcro.

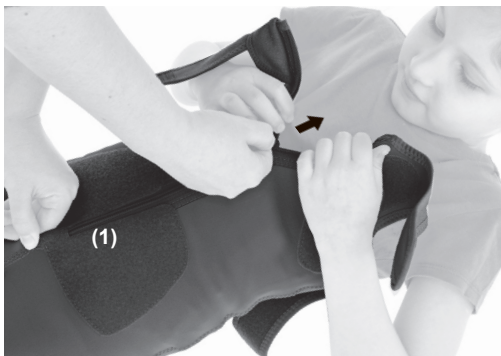


- 3. PL:** Zapnij zamek.
EN: Fasten the zipper.

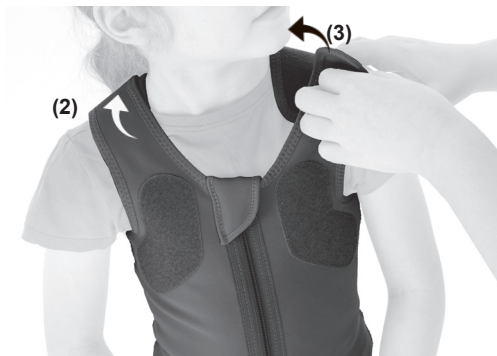

- 4. PL:** Zapnij elementy ramion na rzepy (2,3) ustawiając ich odpowiednie napięcie.
EN: Fasten the arm elements with Velcro (2,3) and set their appropriate tension.



- PL:** Orteza wyposażona w panel stabilizujący umieszczony w tylnej kieszeni.
EN: The brace is equipped with a stabilizing panel placed in the back pocket..

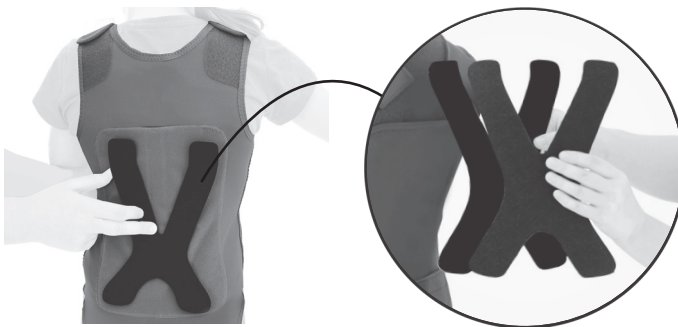

PL: UWAGA! Przed zapięciem pasów upewnij się, że panel stabilizujący znajduje się we właściwym położeniu. Jeśli jest taka potrzeba to użyj dwóch paneli.

EN: WARNING! Before fastening the seat belts, make sure the stabilization panel is in the correct position. If necessary, use two panels.



5. PL: Przypnij taśmę elastyczną (4) do rzepa znajdującego się w przedniej części kamizelki. Opleć we wskazanym kierunku (5), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij z przodu na rzep (6).

EN: Attach the elastic band (4) to the Velcro located on the front of the vest. Braid in the indicated direction (5), set the appropriate tension and fasten with Velcro at the front (6).



6. PL: Powtórz czynność z drugą taśmą.

EN: Repeat with the second tape.



7. PL: Przypnij taśmę elastyczną (10) do rzepa znajdującego się w przedniej części kamizelki. Opleć we wskazanym kierunku (11), ustaw odpowiednie napięcie i zapnij z przodu na rzep (12).

EN: Attach the elastic band (10) to the Velcro located on the front of the vest. Braid in the indicated direction (11), set the appropriate tension and fasten with Velcro at the front (12).



8. PL: Powtórz czynność z drugą taśmą.

EN: Repeat with the second tape.



9. PL: Gotowy wyrób.

EN: Product is ready to use.